

A woman with long, wavy, light brown hair and blue eyes is smiling slightly. She is wearing a dark blue blazer over a dark grey t-shirt. She is holding a white, bulb-shaped device with a long, thin, curved nozzle in her right hand. The device is the Navina Mini. The background is a plain, light blue-grey color.

EN LITEN LÖSNING FÖR RESULTAT DIREKT

Navina™ Mini kan lindra dina tarmproblem.
En intuitiv lösning vid ofullständig tarmtömning
och/eller avföringsläckage.

Navina™ Mini

NAVINA MINI KAN GE DIG FRIHET

Att ha problem med tarmen är påfrestande och kan ha en stor påverkan på din hälsa och livskvalitet. Det kan kännas pinsamt och bara tanken på att riskera avföringsläckage, kan få många att begränsa sitt sociala liv.

Dessa problem är mer vanliga än man kan tro, men tyvärr är det något som vi sällan pratar om. Tack och lov finns det produkter som kan hjälpa.

En lösning är Navina Mini - en användarvänlig produkt som kan lindra symptom som:

- ✓ en känsla av ofullständig tarmtömning
- ✓ problem med avföringsläckage

EN LITEN LÖSNING FÖR RESULTAT DIREKT

Navina Mini är en diskret och intuitiv lösning för lågvolymsirrigering som kan hjälpa vid symptom som ofullständig tarmtömning eller avföringsläckage. Med bara en lätt sköljning med vatten töms nedre delen av tarmen. Det ger lindring direkt samt förebygger avföringsläckage.



SMART DESIGN GÖR DET ENKELT

Formad för att passa i handen
bekvämt att hålla i och hantera.

Klämvänlig vattenbehållare
som rymmer 185 ml vatten

Rundad topp
för skonsamt införande

Hygienisk
för bekväm användning

Förlängningsslang
kan kopplas på för extra räckvidd




Hållbar design

Vattenbehållaren och den valfria förlängningsslangen kan användas upp till 60 gånger.


Rektalkonan är för engångsbruk.

Navina Mini är 100% fri från PVC och ftalater.


GÖR SÅ HÄR

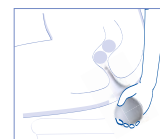

- 1 Sitt på eller stå över toaletten. För in konan i ändtarmen.

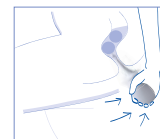

- 2 Skölj genom att försiktigt klämma på vattenbehållaren.

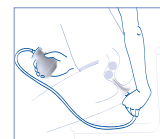

- 3 Du kan använda förlängningsslange om du vill.



För mer information, scanna koden med din smartphone.

Navina Tarmskötsel. Ett komplett produktsortiment.

Vi vet att behov och önskemål kring tarmskötsel är väldigt individuella. Navina-produkterna erbjuder ett brett sortiment för tarmskötsel för olika behov, alla med samma höga kvalitet, användarvänlighet och flexibilitet – oavsett vilken produkt du väljer.

För att läsa mer om vårt kompletta sortiment av Navina-produkter för tarmskötsel, scanna QR-koden och besök vår hemsida:



Navina Mini

Avsedd användning

Navina Mini är avsedd för transanal irrigering genom att instillera en mindre volym vatten i rektum genom en rektalkona för engångsanvändning.

Indikationer

Navina Mini är avsedd för vuxna, ungdomar och barn från 3 år, som lider av ofullständig tarmtömning och/eller avföringsläckage.

Kontraindikationer

- Känd anal eller kolorektal stenosis
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit och divertikulär abscess
- Kolorektal cancer
- Ischemisk kolit
- Genomgått anal eller kolorektal operation för mindre än tre månader sedan



Tillverkare:
Wellspect HealthCare,
Aminogatan 1, Box 14,
431 21 Mölndal
Tel: 031 376 40 00.
www.wellspect.se



Den här listan är inte nödvändigtvis fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till användarens individuella omständigheter. Läs bruksanvisningen innan användning.

Arikelnummer	Benämning	Specifikat
6931000	Navina Mini Start Set	1 vattenbehållare, 5 rektalkonor, 1 förlängningsslang
6930700	Navina Mini Set	1 vattenbehållare, 30 rektalkonor,
6930800	Navina Mini Extension Set	1 vattenbehållare, 30 rektalkonor, 1 förlängningsslang
6930900	Navina Mini Refill Set	30 rektalkonor,

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmdysfunktion. Vi inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i mer än 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vårt mål är att våra produkter skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt och strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök [Wellspect.se](https://www.wellspect.se). Följ oss också på LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram.

[wellspect.se](https://www.wellspect.se)

